

Használati utasítás

7726 VÁLLVÉDŐ

Funkció:	Melegíti a váll-, mell- és nyakizmokat, serkenti a keringést az ízületekben és az ízületek környékén. Enyhíti a fájdalmat és oldja a merevséget. Optimalizálja az izomkontrollt a váll környékén.
Indikáció:	Az izmok és ínák túlerőltetése és gyulladása. Vállsérülések utáni rehabilitáció.
Anyag:	3 mm-es SBR/neoprén, poliamid jersey.
Alkalmazás:	1) Helyezzük a bandázst a karra és a vállra. 2) A szalagot húzzuk át az egészséges kar alatt és zárjuk be a tépőzárát elöl, a mellkason.

Fontos információ!

- 1) Amennyiben kérdés merülne fel az alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a felíró orvossal.
- 2) A termék nem tűzálló, ne tegye ki 120 C°-nál magasabb hő hatásának.
- 3) Kisebb beállításokat elvégezhet az eszközön a felíró vagy szakkereskedő ill. az erre felhatalmazott személy. A felíró orvos utasításait be kell tartani.
- 4) A termék eredeti funkcióját nem szabad megváltoztatni, a terméket kizárólag a megadott indikáció ellátására szabad alkalmazni.
- 5) Neoprén termékeket nem szabad 3-4 óránál hosszabb ideig megszakítás nélkül viselni. Más anyagból készült termékek sem hordhatók 8 óránál tovább, kivéve ha a felíró erről másképp nem rendelkezik.
- 6) Amennyiben allergiás a latexra vagy gumira és a termék tartalmaz latexet vagy gumit, használatba vétel előtt tanácsos konzultálnia a felíró orvossal.
- 7) Ha allergiás a melegre, javasoljuk, hogy ne használjon melegítő hatású neoprén anyagból készült eszközt.

Mosási tudnivalók

- 1) Zárjuk be az összes tépőzárát.
- 2) Távolítsuk el a kivehető merevítőket.
- 3) Mosózsák használata ajánlott.
- 4) Nedvesen húzkodjuk ki majd hagyjuk megszáradni.



Forgalmazza:

Otto Bock Hungária Kft.

1135 Budapest Tatai út 74.

Tel.: (06-1) 451 10 20 · Fax: (06-1) 451 10 21

www.rehband.hu