

## Használati utasítás

### 7782 TÉRDVÉDŐ tehermentesítő párnákkal

- Funkció:** Beépített védőpárnákkal és rugalmas oldalmerevítőkkal védi a térdet. Stabilizálja a térdkalácsot és térdízületet.
- Indikáció:** Enyhe fokú instabilitás és/vagy fájdalom kollaterális szalagsérülés, porcsérülés, meniszkusz problémák vagy lábszár- és combizom-sérülések.
- Anyag:** 5 mm-es SBR/neoprén, poliamid jersey, rugalmas merevítők.
- Alkalmazás:**
- 1) Nyissa ki a tépőzárakat és helyezze az eszközt a térdre.
  - 2) A térdkalács feküdjön a nyílásba.
  - 3) A pelotta ilyenkor körülvézi a térdkalácsot és nyomást fejt ki a térdkalács-ínra.
  - 4) Húzza meg a tépőzár-szalagokat a lábszáron és a combon.
  - 5) A térdkalács-ínra vagy a térdkalács oldalára kifejtendő speciális nyomás fokozása érdekében használja a pelottát.

### Fontos információ!

- 1) Amennyiben kérdés merülne fel az alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a felíró orvossal.
- 2) A termék nem tűzálló, ne tegye ki 120 C°-nál magasabb hő hatásának.
- 3) Kiseb beállításokat elvégezhet az eszközön a felíró vagy szakkereskedő ill. az erre felhatalmazott személy. A felíró orvos utasításait be kell tartani.
- 4) A termék eredeti funkcióját nem szabad megváltoztatni, a terméket kizárólag a megadott indikáció ellátására szabad alkalmazni.
- 5) Neoprén termékeket nem szabad 3-4 óránál hosszabb ideig megszakítás nélkül viselni. Más anyagból készült termékek sem hordhatók 8 óránál tovább, kivéve ha a felíró erről másképp nem rendelkezik.
- 6) Amennyiben allergiás a latexra vagy gumira és a termék tartalmaz latexet vagy gumit, használatba vétel előtt tanácsos konzultálnia a felíró orvossal.
- 7) Ha allergiás a melegre, javasoljuk, hogy ne használjon melegítő hatású neoprén anyagból készült eszközt.

### Mosási tudnivalók

- 1) Zárjuk be az összes tépőzárát.
- 2) Távolítsuk el a kivehető merevítőket.
- 3) Mosózsák használata ajánlott.
- 4) Nedvesen húzkodjuk ki majd hagyjuk megszáradni.



Forgalmazza:

**Otto Bock Hungária Kft.**

1135 Budapest Tatai út 74.

Tel.: (06-1) 451 10 20 · Fax: (06-1) 451 10 21

[www.rehband.hu](http://www.rehband.hu)